

S I D A M

医療機器承認番号: 21300BZY00522000

販売名: ドレナージシステム

PVCドレーンチューブタンクキット

閉鎖式ディスポーザブル低圧持続吸引器
穏やかな吸引を持続させ創傷の治癒を促進



適応

- 皮下腫瘍摘出術
- 脂肪腫摘出術
- 軟骨移植術
- 四肢における小切開手術

注文番号	チューブ外形	タンク容量
KPV24T020	2.4mm	20mL(PE)
KPV32T020	3.2mm	20mL(PE)
KPV24T050	2.4mm	50mL(PE)
KPV32T050	3.2mm	50mL(PE)

手技料: J002 ドレーン法(ドレナージ)(一日につき) 1 持続的吸引を行うもの 45点



■製造販売元: 株式会社トライテック
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-32-4
ハインスロフティ 3F
本社TEL) 03-3375-7585
関西営業所TEL) 06-6535-7163
■製造元: SIDAM s.a.s(イタリア)


SIDAM PVCドレーンチューブタンクキット使用方法

吸引の手順

1. キャップを緩めてからタンクを圧縮し、創部に留置したドレーンチューブの末端を挿入します。キャップは完全に外さないでください。



2. ドレーンチューブ挿入後、キャップ(赤矢印)を時計回りに回してしっかり締めます。

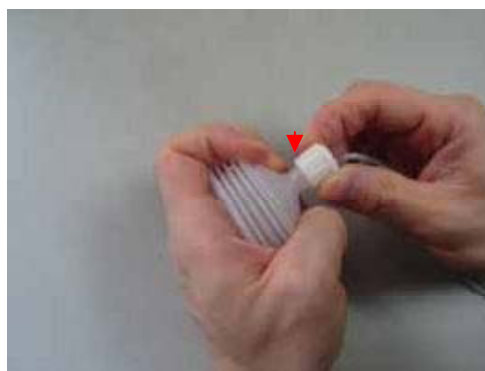


3. 圧縮したタンクを離し開放します。(吸引圧が発生します)



(写真は 50ml タンク。20ml タンクも同様です)

排液の手順

1. キャップ(赤矢印)を反時計回りに回して緩め、ドレーンチューブを取り出します。

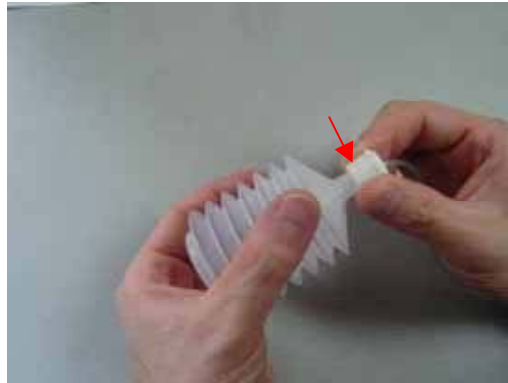

2. キャップを再び閉め、タンクを圧縮して排液します。
* **キャップを外して排液しないでください。**



(写真は 50mL タンク。20mL タンクも同様です)

製造販売業者:株式会社トライテック
〒160-0023
東京都新宿区西新宿 4-32-4 ハイネスロフティ 3F
TEL 03-3375-7585(代)