


GOCCIA MICRO 40

Microaggregates removing filter

ユーロセット輸血フィルターセット

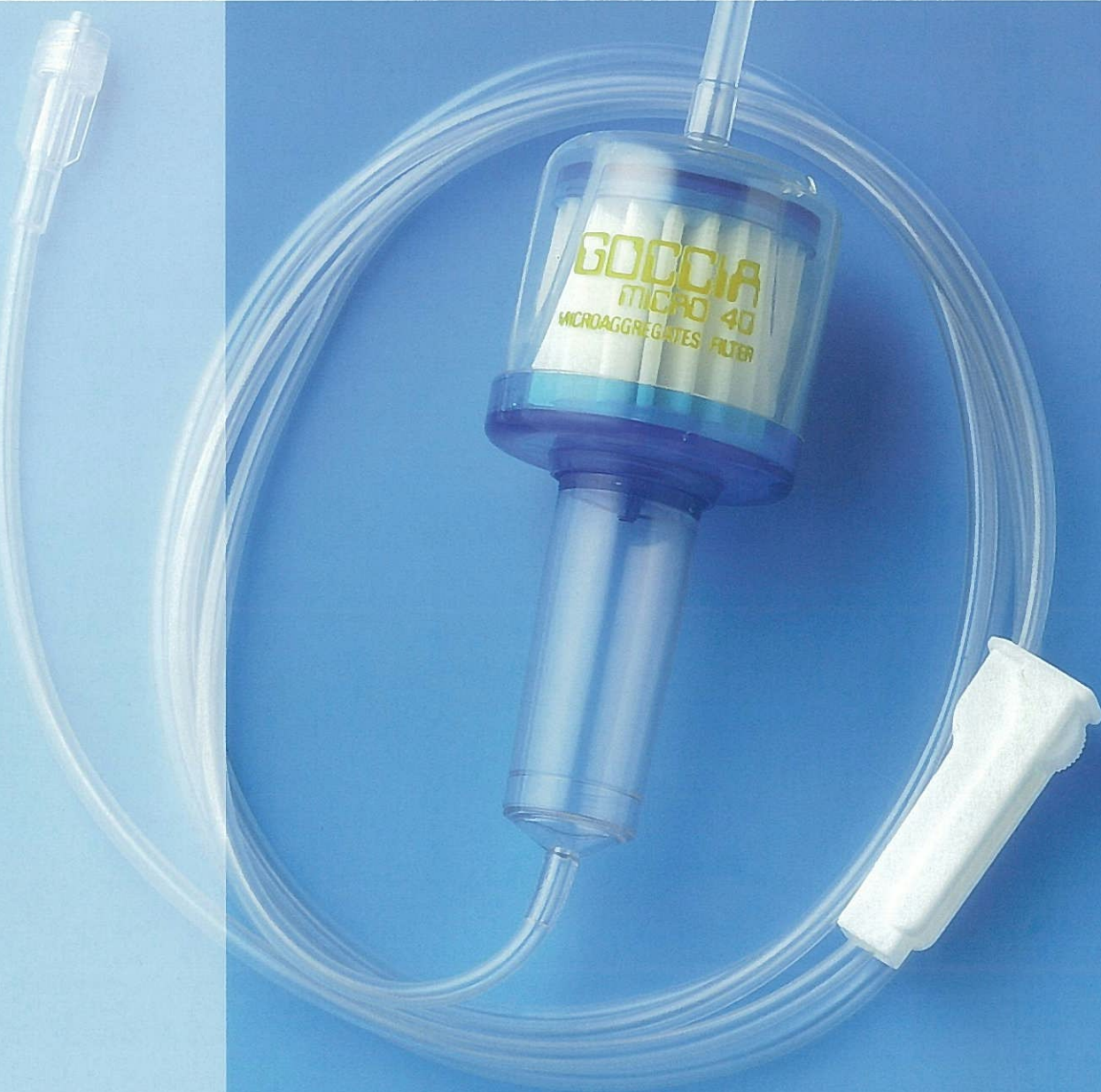



Microaggregates removing filter GOCCIA MICRO 40

GOCCIA 輸血フィルターは保存血液中40 μ 以上の微小凝集塊を除去します。


製品特徴：血液バックへの挿入を容易にするため、びん針とフィルターハウジング部を一体化させ、持ちやすい構造にしました。プライミングボリュームが少なく、コンパクトで40 μ 以上の凝集塊をほぼ100%除去します。

先端は斜めにカットされている為、流入口が広く微小凝集塊の目詰まりが回避できます。



仕様

材質(フィルター部)	ポリエステル
最大使用血液量	2000mL
プライミングボリューム	35mL
容器耐圧	400mmHg
滅菌方法	エチレンオキサイドガス滅菌
1mL \approx 20滴	

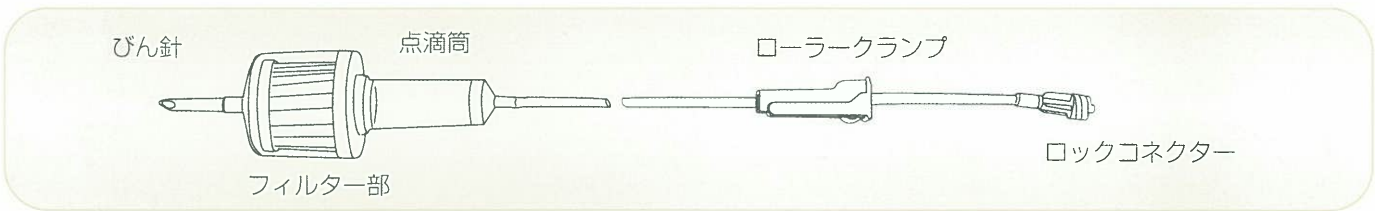


使用方法

- 1-滅菌袋から取り出しローラーランプを閉じます。
- 2-びん針を血液バックに差し込みます。
- 3-血液バックを逆さに持ち、バックを絞りながらローラーランプを緩め、フィルターとラインを満たしたらローラーランプを閉じます。
- 4-バックをガートル台に掛けて、輸血を開始します。

血液バックの交換方法

- 1-フィルターにエアを入れないようにローラーランプを閉じます。
- 2-ガートル台から血液バックを外し、びん針を抜き取ります。

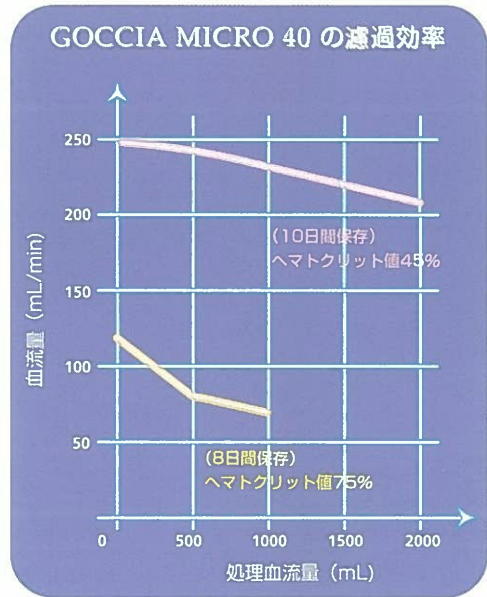

製品名	カタログ番号	仕様
GOCCIA マイクロアグリゲートフィルター40 μ m	EU3079	40ミクロン

※25 μ m (EU3078) もあります。

保険適用：輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）
 適用条件：一日当たり1000mL以上の輸血を行う場合体重40kg以下の患者については、体重1kg当たり25mLの輸血を行う場合に算定できる。
 販売名：ユーロセット輸血フィルターセット
 医療用具承認番号：21400BZY00188000

この製品の使用に際しては、取扱説明書を必ずお読み下さい。



製造販売業者

株式会社トライテック

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-4
ハynesロフティ 3F

営業本部：TEL.03-3375-7585 FAX.03-3375-6864
関西営業所：TEL.06-6535-7163 FAX.06-6535-7164