

# GOCCIA MICRO 40

Microaggregates removing filter  
ユーロセット輸血フィルターセット



株式会社トライテック



# Microaggregates removing filter GOCCIA MICRO 40

GOCCIA 輸血フィルターは保存血液中40 $\mu$ 以上の微小凝集塊を除去します。


**製品特徴：**血液バックへの挿入を容易にするため、びん針とフィルターハウジング部を一体化させ、持ちやすい構造にしました。プライミングボリュームが少なく、コンパクトで40 $\mu$ 以上の凝集塊をほぼ100%除去します。

先端は斜めにカットされている為、流入口が広く微小凝集塊の目詰まりが回避できます。



## 仕様

材質(フィルター部)	ポリエステル
最大使用血液量	2000mL
プライミングボリューム	35mL
容器耐圧	400mmHg
滅菌方法	エチレンオキサイドガス滅菌
1mL $\approx$ 25滴	

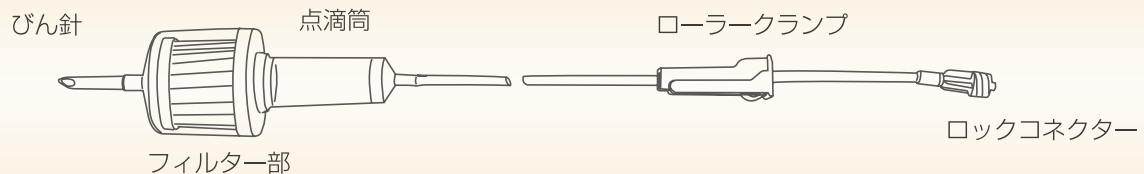


## 使用方法

- 1-滅菌袋から取り出しローラーランプを閉じます。
- 2-びん針を血液バックに差し込みます。
- 3-血液バックを逆さに持ち、バックを絞りながらローラーランプを緩め、フィルターとラインを満たしたらローラーランプを閉じます。
- 4-バックをガートル台に掛けて、輸血を開始します。

## 血液バックの交換方法

- 1-フィルターにエアーを入れないようにローラーランプを閉じます。
- 2-ガートル台から血液バックを外し、びん針を抜き取ります。

## GOCCIA MICRO 40 の濾過効率

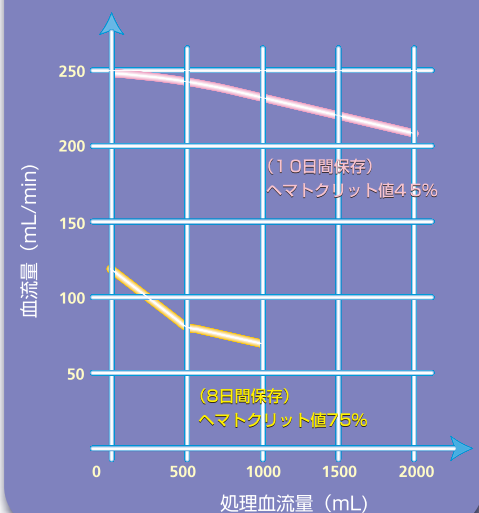

保険医療材料請求分類：輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）  
 適用条件：一日当たり1000mL以上の輸血を行う場合体重40kg以下の患者については、体重1kg当たり25mLの輸血を行う場合に算定できる。  
 販売名：ユーロセツ輸血フィルターセット  
 医療機器認証番号：21400BZY00188000

製品名	カタログ番号	仕様
GOCCIA マイクロアグリゲートフィルター40 $\mu$ m	EU3079	40ミクロン

この製品の使用に際しては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

■ 製造業者 **EUROSETS s.r.l.** (イタリア)

■ 製造販売業者

**株式会社トライテック** (<http://www.trytech.co.jp>)

〒140-0013 東京都品川区南大井1-20-17 マルイト南大井ビル3F  
 営業本部 / TEL 03-5767-9831 FAX 03-5767-9839  
 関西 / TEL 06-6535-7163 FAX 06-6535-7164

(株)トライテックは ISO 13485 の認証を取得し、このシステムに基づき製品管理への取り組みを着実に進めております。

TRT-EUR-GCA-1511-0001

