

EUROSETS

GOCCIA MICRO 40

Microaggregates Removing Filter



輸血用フィルター（微小凝集塊除去用）

GOCCIA MICRO 40

Microaggregates Removing Filter

GOCCIA 輸血フィルターは保存血液中 40 μ 以上の微小凝集塊を除去します。

製品特徴


血液バックへの挿入を容易にするため、びん針とフィルターハウジング部を一体化させ持ちやすい構造にしました。プライミングボリュームが少なく、コンパクトで 40 μ 以上の微小凝集塊をほぼ 100%除去します。

仕様

材質（フィルター部）	ポリエステル
最大使用血液量	2000ml
プライミングボリューム	35ml
容器耐圧	400mmHg
滅菌方法	エチレンオキサイドガス滅菌
1ml $\approx$ 20 滴	



使用方法

- 1.滅菌袋から取り出しローラークランプを閉じます。
- 2.びん針を血液バックに差し込みます。
- 3.血液バックを逆さに持ち、バックを絞りながらローラークランプを緩めフィルターとラインを満たしたら、ローラークランプを閉じます。
- 4.バックをガートル台に掛けて輸血を開始します。

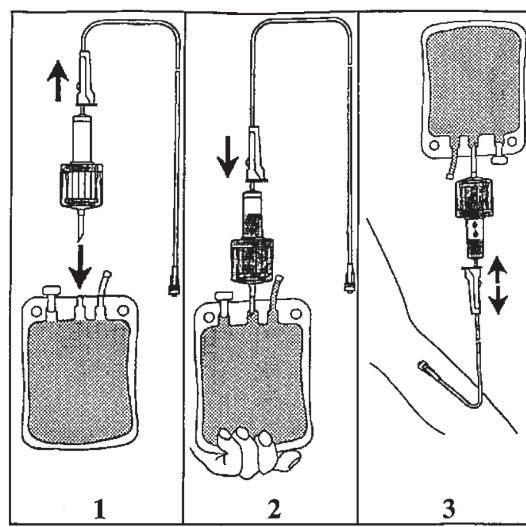

血液バックの交換方法

1. フィルターにエアーを入れないように、ローラークランプを閉じます
2. ガートル台から血液バックを外し、びん針を抜き取ります。

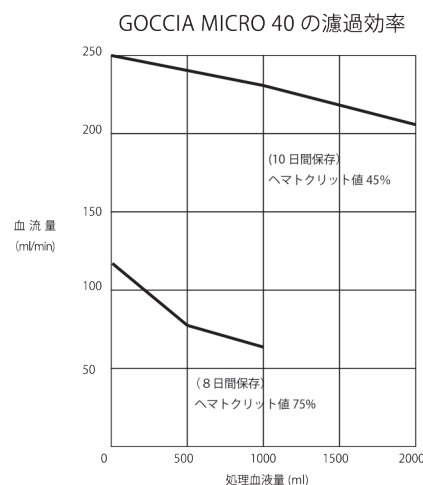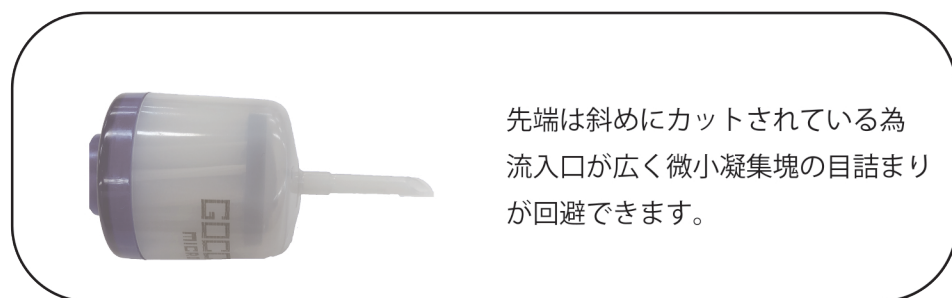

製品名	カタログ番号	仕様
GOCCIA マイクロアグリゲートフィルター 40 μ	EU3079	40 μ (ミクロン)

保険適用：輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）

提供条件：1日当たり 1000ml 以上の輸血を行う場合。体重 40Kg 以下の患者については、体重 1Kg 当たり 25ml の輸血を行う場合算定できる

医療機器認証番号 21400BZY00188000

製造販売業者

株式会社トライテック (<https://trytech.co.jp>)



140-0013 東京都品川区南大井 1-20-17
TEL:03-5767-9831 FAX:03-5767-9839
関西支店
TEL:075-275-2787 FAX:075-277-4912



GOCCIA 1812-200

㈱トライテックは ISO13485 の認証を取得し
このシステムに基づき製品管理への取り組みを
着実に進めております。