


MEDICAL CONCEPTS TEMPORARY PACING WIRE

ペーシングワイヤー

MCE
medical concepts europe


電極と電線の段差が少なく通過性が良くなり
出血リスクが軽減します。

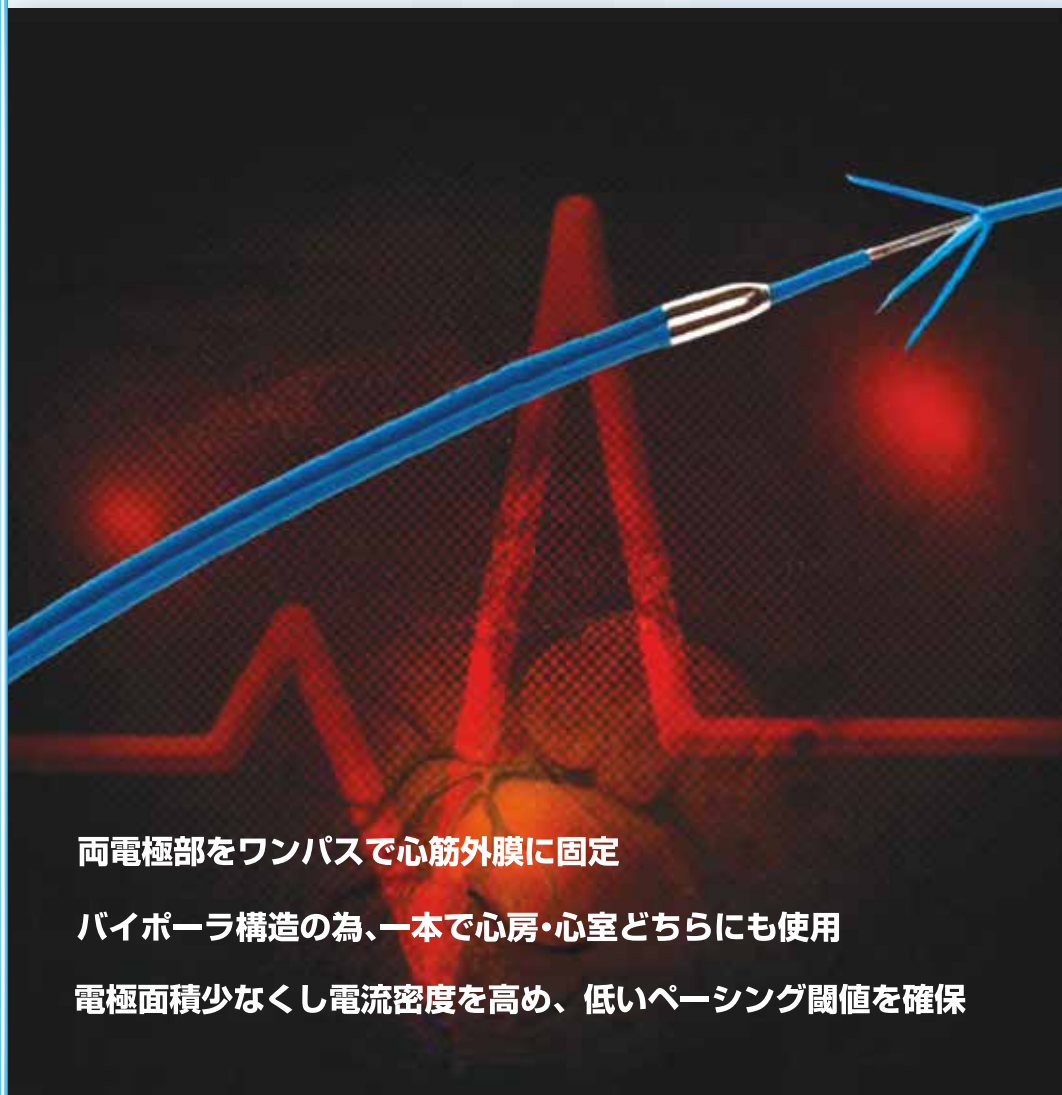


両電極部をワンパスで心筋外膜に固定

バイポーラ構造の為、一本で心房・心室どちらにも使用


電極面積少なくし電流密度を高め、低いペーシング閾値を確保

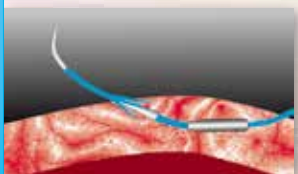


1. 電極部分を心筋内に縫い込みます。

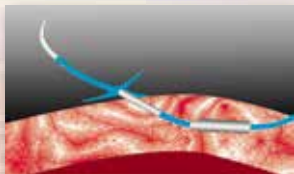

2. ディスタール電極とアンカーを心筋外膜の外側まで引き出して下さい。

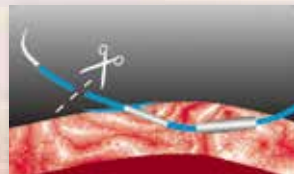

3. アンカーの先の不要部分を1cm以上残してカットしてから、両方の電極が心筋内に埋没する様にペーシングワイヤーを引き戻して下さい。この時アンカーが心筋外膜の上でフレア状に広がっている事を確認して下さい。

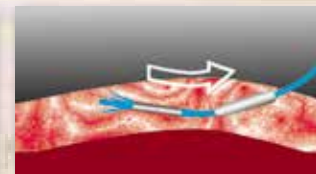

4. ペーシングワイヤーを抜く時はペーシングワイヤーの体外部分を引っ張り電極を心筋から外して下さい。アンカーは逆方向にたたまれるため、心筋に与える損傷はほとんど有りません。



株式会社トライテック



メディカルコンセプト
ヨーロッパ (オランダ)


■ 保険医療材料請求分類
体外式ペースメーカー用心臓植込ワイヤー(2)双極以上

■ 医療機器承認番号:20800BZY01018000
販売名:ペースングワイヤー

形状

フレア電極タイプ


BM604AB/BDJA

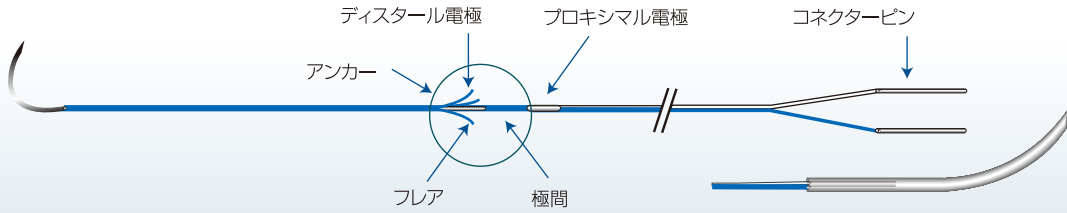

■ スライドオフタイプ
コネクターピン
■ 針からコネクターピンを
抜きアダプターにセット

フレア電極タイプ


BM604AB/BJA

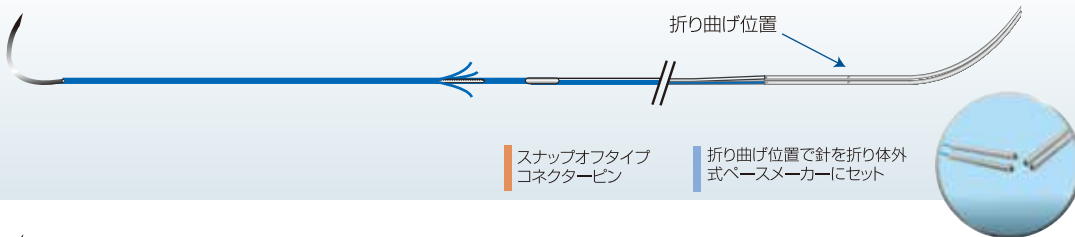

■ スナップオフタイプ
コネクターピン
■ 折り曲げ位置で針を折り体外
式ペースメーカーにセット

ジグザグ電極タイプ

BMZ602AB/BDS

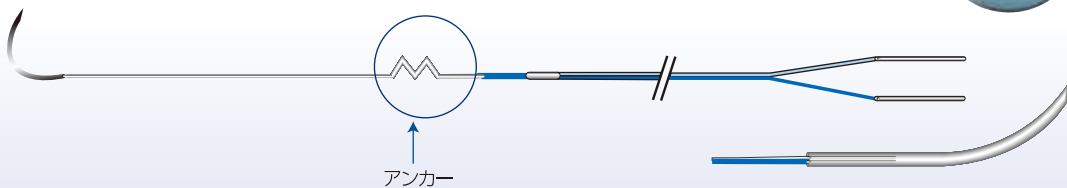


■ スライドオフタイプ
コネクターピン
■ 針からコネクターピンを
抜きアダプターにセット

仕様

カタログ番号	アンカータイプ(形状)	長さ	極間	腹部針タイプ	アダプター
BM604AB/BDJA	フレア	60cm	4mm	スライドオフ	有
BM604AB/BJA	フレア	60cm	4mm	スナップオフ	無
BMZ602AB/BDS	ジグザグ	60cm	2mm	スライドオフ	有

使用前準備

◆ディスタール電極と心筋との接触を確実にするために指でアンカーを広げて下さい。

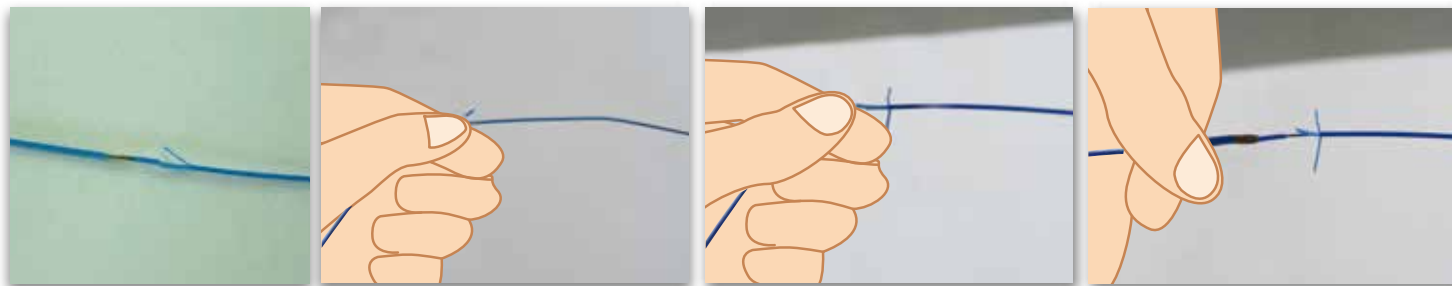


スライドオフタイプ用
アダプター使用方法

体外式ペースメーカーに
接続していない時はキャッ
プをしてください。




アダプター全景

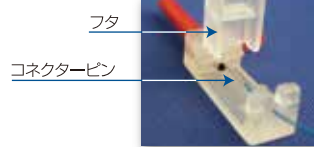

コネクターピンをア
ダプターに挿入



フタをしっかり閉じます

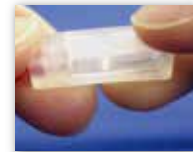

写真のように持ちアダ
プター底部から力を入
れ曲げ、ロックを外す

使用方法

開け方

■ 製造販売業者

株式会社トライテック (<http://www.trytech.co.jp>)

〒140-0013 東京都品川区南大井1-20-17
営業本部 / TEL:03-5767-9837 FAX03-5767-9839
関 西 / TEL:075-275-2787 FAX075-277-4912

■ 製造業者: Medical Concepts Europe (オランダ)

(株)トライテックは ISO 13485 の認証を取得し、
このシステムに基づき製品管理への取り組みを
着実に進めております。

TRT-MCE-PW-1511-0001

