

EUROSETS

GOCCIA MICRO 40

Microaggregates Removing Filter



輸血用フィルター（微小凝集塊除去用）



GOCCIA MICRO 40

Microaggregates Removing Filter

GOCCIA 輸血フィルターは保存血液中 40 μ 以上の微小凝集塊を除去します。

製品特徴


血液バックへの挿入を容易にするため、びん針とフィルターハウジング部を一体化させ持ちやすい構造にしました。プライミングボリュームが少なく、コンパクトで 40 μ 以上の微小凝集塊をほぼ 100%除去します。

仕様

材質 (フィルター部) ポリエステル
 最大使用血液量 2000ml
 プライミングボリューム 35ml
 容器耐圧 400mmHg
 滅菌方法 エチレンオキサイドガス滅菌
 1ml \approx 20 滴


使用方法

1. 滅菌袋から取り出しローラクランプを閉じます。
2. びん針を血液バックに差し込みます。
3. 血液バックを逆さ持ち、バックを絞りながらローラクランプを緩めフィルターとラインを満たしたら、ローラクランプを閉じます。
4. バックをガートル台に掛けて輸血を開始します。

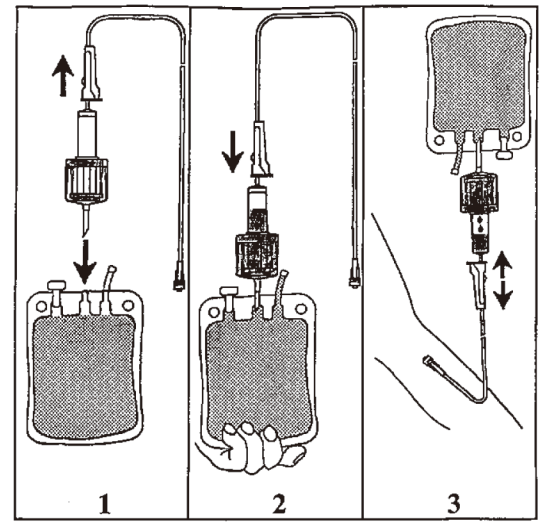


血液バックの交換方法

1. フィルターにエアーを入れないように、ローラクランプを閉じます
2. ガートル台から血液バックを外し、びん針を抜き取ります。

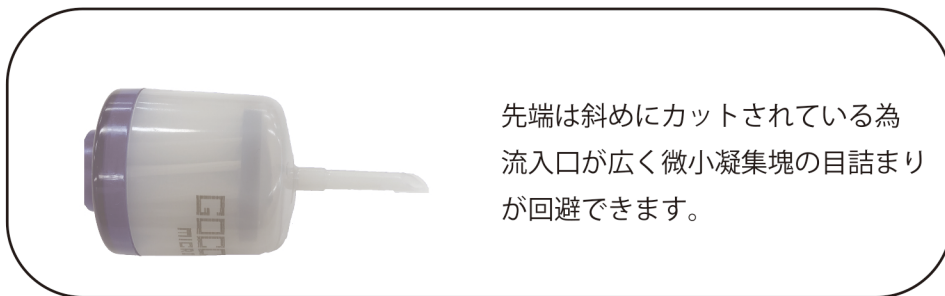

GOCCIA MICRO 40 の濾過効率

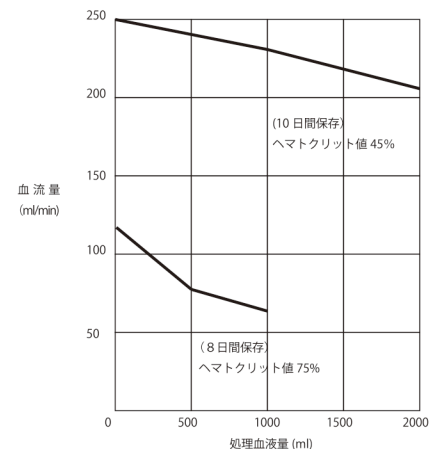

製品名	カタログ番号	仕様
GOCCIA マイクロアグリゲートフィルター 40 μ	EU3079	40 μ (ミクロン)

保険適用：輸血用血液フィルター (微小凝集塊除去用)

提供条件：1日当たり 1000ml 以上の輸血を行う場合。体重 40Kg 以下の患者については、体重 1Kg 当たり 25ml の輸血を行う場合算定できる

医療機器認証番号 21400BZY00188000

製造販売業者

株式会社トライテック (<https://trytech.co.jp>)

140-0013 東京都品川区南大井 1-20-17
 TEL:03-5767-9831 FAX:03-5767-9839
 関西支店
 TEL:075-275-2787 FAX:075-277-4912



GOCCIA 1812-200

関トライテックは ISO13485 の認証を取得しこのシステムに基づき製品管理への取り組みを着実に進めております。

